

# FACESHIELD


## 1) Partes Impressas

Peças impressas por FDM, em ABS ou PLA, em configurações comuns de impressão para garantir velocidade e resistência mecânica (altura da camada aproximadamente 0,2mm)

### a. Tiara (faceshield\_1.stl)




### b. Suporte inferior (faceshield\_2.stl)

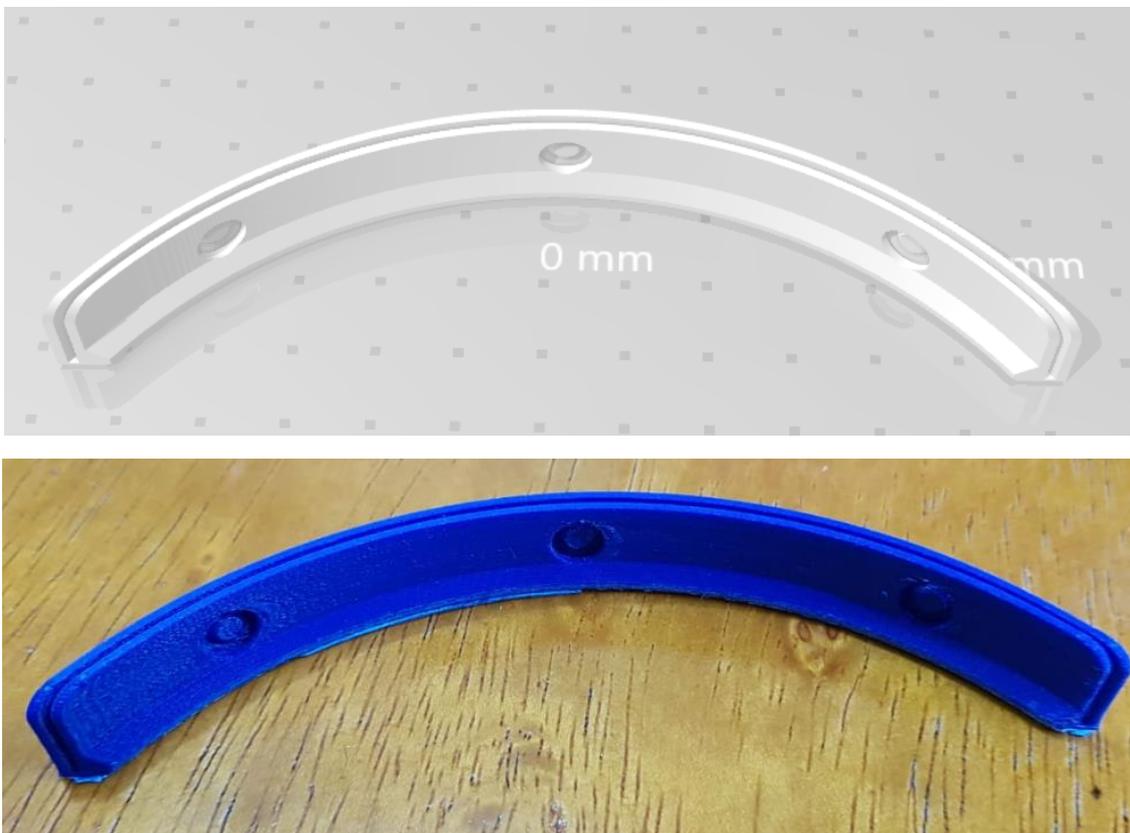

## 2) Partes não impressas

### a. Acetato

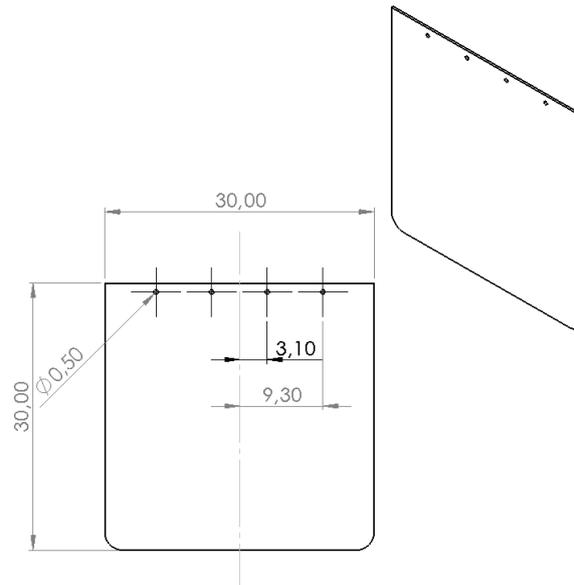

### b. Tira de elástico (aproximadamente 20cm)

## 3) Montagem

- i. Imprima as peças
- ii. Corte e fure o acetato conforme descrição (item 2 a)
- iii. Encaixe a tiara nos furos do acetato
- iv. Encaixe o reforço inferior na parte debaixo do acetato
- v. Faça um laço nas duas pontas da tira de elástico e passe cada lado em uma perna da tiara de forma que o elástico fique preso na tiara (figura abaixo)



